

SADA PRO ODBĚR SLIN

Návod k použití

POUŽITÍ

Používá se pro odběr slin.

PRINCIP

Ergonomické zařízení navržené pro snadný odběr slin. Konzervačním roztokem je Hankův vyvážený solný roztok, který může stabilizovat virus. Ke konzervačnímu roztoku byla přidána fenolová červeň, která slouží jako indikátor stavu konzervačního roztoku. Antibiotika byla přidána s cílem zabránit růstu bakterií a plísní.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Podmínky skladování: pokojová teplota (2–30 °C).

OBSAH SADY

1. Zařízení pro odběr slin
2. 5 ml zkumavka naplněná 2 ml pufru
3. Lepící štítek
4. Biohazard sáček
5. Laboratorní žádanka
6. Transportní sáček pro odevzdání na odběrovém místě
7. Pokyny pro nakládání s odebraným vzorkem
8. Návod k použití

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Před odběrem vzorku si vypláchněte ústa vodou a nejezte.
2. Uvolněte tvář a plivněte sliny do odběrového zařízení až po značku 2 ml, ujistěte se, že požadované množství neobsahuje bubliny.
3. Přidejte konzervační roztok z předem naplněné zkumavky.
4. Odšroubujte odběrové zařízení a našroubujte víčko ze zkumavky, ve které byl roztok.
5. Zkumavku asi 10krát převraťte, aby se obsah promíchal.
6. Vyplňte potřebné informace na lepící štítek a přilepte ho na zkumavku.
7. Vložte zkumavku do biohazard sáčku pro bezpečnou přepravu.



1. Vyjměte zařízení pro odběr slin a zkumavku s konzervačním roztokem.



2. Uvolněte tvář a plivněte do odběrového zařízení až po značku 2 ml, ujistěte se, že požadované množství neobsahuje bubliny.



3. Přidejte konzervační roztok z předem naplněné zkumavky.



4. Odšroubujte odběrové zařízení a našroubujte víčko ze zkumavky, ve které byl roztok.



5. Zkumavku asi 10x převraťte, aby se obsah promíchal.

OPATŘENÍ

1. Nedotýkejte se vnitřku odběrového zařízení rukama ani jinými předměty při jeho použití.
2. Produkt je na jedno použití, nepoužívejte jej opakovaně.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený obal.
4. Nepoužívejte výrobek po vypršení expirace.
5. Výrobek by měl být skladován v suché, větrané a čisté místnosti bez vystavení slunečnímu záření.
6. Nepijte konzervační roztok a ani se ho nedotýkejte. Roztok může být zdraví škodlivý při požití a při kontaktu může způsobit podráždění pokožky a očí.
7. Pokud je to možné, noste jednorázové rukavice po celou dobu manipulace s výrobkem.

Datum výroby a expirace: viz štítek

